



# K-PL100 GRUETTA SOLLEVA PERSONE

La K-PL100 è la nuova gruetta Kivi che facilita il trasferimento dalla carrozzina al sedile dell'auto e viceversa, consentendo all'utilizzatore di entrare e/o uscire dall'abitacolo senza alcuna difficoltà. Il dispositivo può essere installato su vetture a 3 o a 5 porte, sia in corrispondenza del lato destro che di quello sinistro, a condizione che il dislivello tra la parte più alta della seduta del sedile e la seduta della carrozzina (considerando anche l'eventuale cuscino) non superi i 50 cm. Questo sistema si compone di una staffa (fissa o mobile), di un braccio articolato, di un'imbragatura (taglia S, M o L) e di una pulsantiera. Utilizzare la K-PL100 è semplice: dopo aver avvicinato la persona in carrozzina alla vettura, l'accompagnatore posizionerà l'imbragatura dietro la schiena del passeggero facendo scivolare le estremità inferiori sotto le cosce e le estremità superiori sotto le ascelle. Dopodiché, aggancerà le 4 estremità dell'imbragatura ai perni presenti sul braccio del sollevatore. Il movimento di salita e discesa viene controllato elettricamente attraverso la pulsantiera, mentre quello laterale di entrata e uscita viene gestito manualmente. Se utilizzata in abbinamento alla staffa mobile, l'installazione dell'ausilio non necessita di alcun intervento sulla carrozzeria o nell'abitacolo, dal momento che la staffa viene posizionata sulle cerniere originali della porta. Il braccio snodato con l'imbragatura per il sollevamento della persona viene semplicemente agganciato ai due perni presenti sulla staffa stessa. Per questo motivo, il veicolo può essere rivenduto in qualsiasi momento, senza dover effettuare alcun intervento per riportarlo alle condizioni originali. Se utilizzata in abbinamento alla staffa mobile, sia la staffa che la gruetta, durante il viaggio o in caso di non utilizzo, possono essere smontate e riposte facilmente nel bagagliaio. Se, invece, la gruetta viene utilizzata in abbinamento alla staffa fissa, quando non utilizzata, soltanto la prima potrà essere asportata, mentre la staffa rimane sempre fissa in vettura.





La K-PL100 può essere usata anche come gruetta solleva persone in casa o all'esterno, in abbinamento ad una staffa a muro o ad un carrello mobile. Nel primo caso il braccio articolato della gruetta viene inserito in una staffa, che a sua volta è fissata, all'altezza desiderata, al muro nel luogo in cui il dispositivo deve essere utilizzato. Nel secondo caso, invece, il braccio della gruetta viene inserito in un particolare carrello dotato di ruote che ne permette l'utilizzo in qualsiasi luogo. Se non utilizzato, il carrello può essere facilmente smontato richiedendo un ingombro in lunghezza di appena 97 cm.

La stessa gruetta può essere utilizzata in auto, in casa, e sul carrello mobile.

Informazioni tecniche:

- Portata massima 100 Kg
- Escursione verticale massima 50 cm
- Peso del dispositivo 12.5 Kg

HA SUPERATO I TEST  
DI COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA



PARTNER



Kivi S.r.l.

Strada Carmagnola 1  
14040 Vigliano d'Asti ITALIA

[www.kivi.it](http://www.kivi.it)

[info@kivi.it](mailto:info@kivi.it)

TEL +39.0141.951668

FAX +39.0141.953603


[facebook.com/Kivisrl](https://facebook.com/Kivisrl)

[youtube.com/KiviMobilityFreedom](https://youtube.com/KiviMobilityFreedom)

## DIMENSIONI CARRELLO



## DIMENSIONI IMBRAGATURA

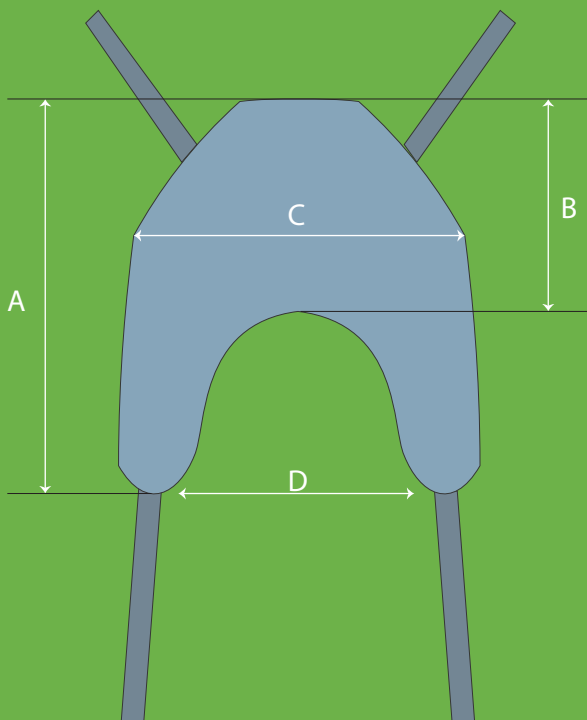

<i>codice &amp; descrizione</i>	A	B	C	D
K-PL100-SLING-S taglia piccola	77	46	86	56
K-PL100-SLING-M taglia media	83	46	86	56
K-PL100-SLING-L taglia grande	96	52	91	68



PARTNER



Kivi S.r.l.

Strada Carmagnola 1  
14040 Vigliano d'Asti ITALIA

[www.kivi.it](http://www.kivi.it)

[info@kivi.it](mailto:info@kivi.it)

TEL +39.0141.951668

FAX +39.0141.953603

[facebook.com/Kivisrl](https://www.facebook.com/Kivisrl)

[youtube.com/KiviMobilityFreedom](https://www.youtube.com/KiviMobilityFreedom)